


3D ŠTÍTY

Zdravíme tě majiteli ochranného obličejového štítu, který jsi obdržel od komunity **3D tisk proti COVID-19**. V tomto letáčku se dozvíš, jak tento štít sestavit a udržovat. Předem **důležitá informace** je, že štít je určen na **jedno použití**.

Takjdeme na to!

SESTAVENÍ ŠTÍTU

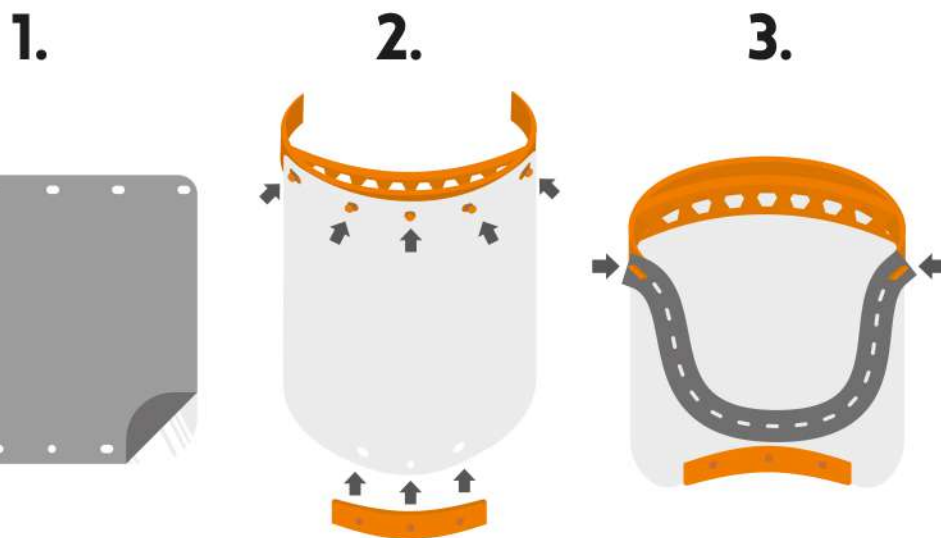

1. odlep ochrannou fólii

2. nacvakni plastové části

3. přidej gumičku

3D TISKEM PROTI COVID-19


3DAC.CZ

3D ŠTÍTY

Zdravíme tě majiteli ochranného obličejového štítu, který jsi obdržel od komunity **3D tisk proti COVID-19**. V tomto letáčku se dozvíš, jak tento štít sestavit a udržovat. Předem **důležitá informace** je, že štít je určen na **jedno použití**.

Takjdeme na to!

SESTAVENÍ ŠTÍTU

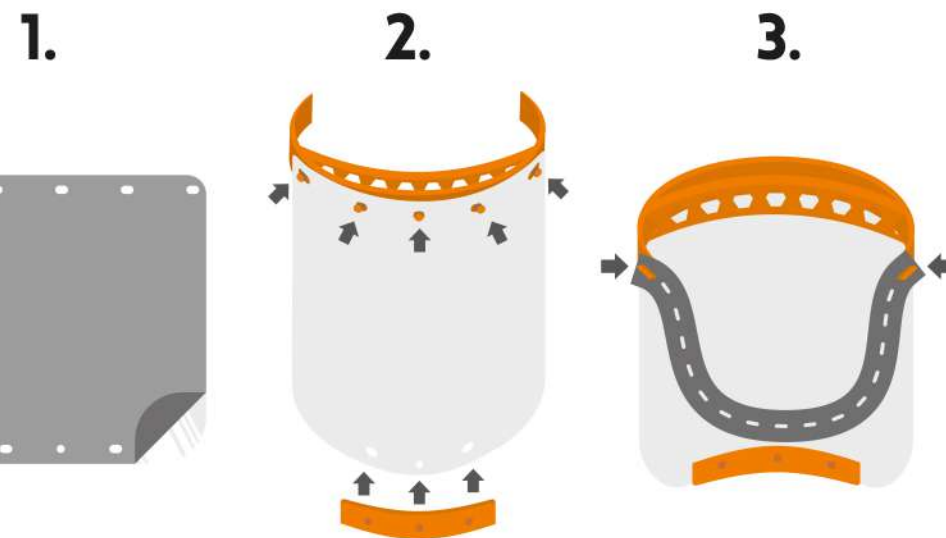

1. odlep ochrannou fólii

2. nacvakni plastové části

3. přidej gumičku

3D TISKEM PROTI COVID-19

3DAC.CZ

ÚDRŽBA

Před použitím **důrazně doporučujeme** všechny součásti štítu **vydezinfikovat a očistit**. I když se snažíme zajistit co nejvíce sterilní podmínky pro balení štítu, je důležité předejít jakémukoli riziku kontaminace. K dezinfekci nedoporučujeme používat **žádnou agresivní chemii!**

O CO JDE?

Štít byl vyroben komunitou 3D tiskařů a je poskytován zcela zdarma. Tisk plastových součástí provádí dobrovolníci z řad naší komunity. Plastové sklo bylo nařezáno taktéž dobrovolníky, kterým patří velké díky! S výrobou jsou spojeny i různé náklady ve výši 75 Kč na jeden štít. Pokud štít využíváte a líbí se vám naše iniciativa, byli bychom rádi, kdybyste náš projekt podpořili jakoukoliv částkou na **TRANSPARENTNÍ ÚČET 4233769003/0800**.



Z výtěžku budeme moci zakoupit další materiál a dostat tak ochranné pomůcky k co největšímu počtu lidí, stejně jako jsme jej dostali k Vám.

PARTNEŘI PROJEKTU

Děkujeme všem sponzorům za pomoc naší komunitě.
Zejména:



PRŮŠA RESEARCH
vytvoření geniálního modelu
tohoto obličejového štítu!



GUTTA
za poskytnutí plexi skel
<https://guttashop.cz>



FILLAMENTUM.COM
poskytnutí filamentu k tisku



FABLAB BRNO
poskytnutí prostor pro kompletaci
a podlení se na tisknutí štítů

ÚDRŽBA

Před použitím **důrazně doporučujeme** všechny součásti štítu **vydezinfikovat a očistit**. I když se snažíme zajistit co nejvíce sterilní podmínky pro balení štítu, je důležité předejít jakémukoli riziku kontaminace. K dezinfekci nedoporučujeme používat **žádnou agresivní chemii!**

O CO JDE?

Štít byl vyroben komunitou 3D tiskařů a je poskytován zcela zdarma. Tisk plastových součástí provádí dobrovolníci z řad naší komunity. Plastové sklo bylo nařezáno taktéž dobrovolníky, kterým patří velké díky! S výrobou jsou spojeny i různé náklady ve výši 75 Kč na jeden štít. Pokud štít využíváte a líbí se vám naše iniciativa, byli bychom rádi, kdybyste náš projekt podpořili jakoukoliv částkou na **TRANSPARENTNÍ ÚČET 4233769003/0800**.



Z výtěžku budeme moci zakoupit další materiál a dostat tak ochranné pomůcky k co největšímu počtu lidí, stejně jako jsme jej dostali k Vám.

PARTNEŘI PROJEKTU

Děkujeme všem sponzorům za pomoc naší komunitě.
Zejména:



PRŮŠA RESEARCH
vytvoření geniálního modelu
tohoto obličejového štítu!



GUTTA
za poskytnutí plexi skel
<https://guttashop.cz>



FILLAMENTUM.COM
poskytnutí filamentu k tisku



FABLAB BRNO
poskytnutí prostor pro kompletaci
a podlení se na tisknutí štítů